

KIT PARA TOMA DE MUESTRAS PCR EN ENJUAGUE BUCAL CORONA TEST

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

¡Gracias por comprar un producto **eSaludPlus!**

Estas instrucciones le guiarán en el uso adecuado del producto.

Paso 1: Prescripción médica.

El código QR1 le permitirá acceder directamente a la página web donde deberá registrar sus Datos Personales, así como el Código de Identificación de la Muestra que se va a tomar, indicado en la pegatina del Tubo de tapa roja y en el recibo de la muestra que se encuentran dentro de la caja. Si no puede leer el QR, inserte en su navegador la dirección web:

<https://registroes.uground.com/userRegistration>

QR1



Paso 2: Toma de muestra de enjuague bucal.

Realice la toma de muestra siguiendo las instrucciones del Código QR2. Este QR (**<http://homekit.lead-horizon.com>**), distinto del anterior, le irá dando instrucciones en su dispositivo (teléfono móvil, tableta u ordenador con webcam para grabar video) indicándole los pasos a seguir para poder realizar una toma de muestra válida para su análisis. El proceso se grabará en video y servirá como prueba de identificación de la muestra con su persona, razón por la que se le pedirán de nuevo algunos datos personales.

La aplicación le pedirá que indique el método de envío de la muestra al laboratorio.

QR2



Paso 3: Análisis de resultados.

En **24-48** horas, el laboratorio analizará las muestras y a través de **eSaludPlus** le enviaremos los resultados. El informe de la prueba le servirá para certificar su estado frente al virus Covid 19 en el momento de la prueba.